

LoFric Primo - miehille

LoFric® Primo™ hydrofiilinen kertakäyttökateetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokattetrintihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.


LoFric-kateetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrintiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Avaa pakkaus. Pidä pakkaus pystyasennossa.
3. Taita ja purista nestepussia.
4. Aktivoi kateetri puristamalla suolaliuosta sisältävää säiliötä. Kateetri on käyttövalmis.
5. a) Avaa pakkaus, ota kateetri pakkauksesta katetrintia varten.
b) VALINNAINEN: avaa sisäänvientiapua käyttäen: Irrota vesipussi repäisemällä liuska "A". Repäise kohdasta "B". Käytä jäljelle jäänyttä osaa sisäänvientiapuna. (Tämä osa mahdollistaa hyvän otteen ja mahdollistaa katetrin sisäänviennin katetriin käsin koskematta.)
6. Nosta penistä ylöspäin vatsaa kohti. Vie kateetri hitaasti virtsaputkeen. Kun virtsaa alkaa valua, työnnä katetria vielä hiukan pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat sisällä virtsarakossa.
7. Laske penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin kautta.
8. Kun virtsaa ei enää valu katetrin kautta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten kateetri kokonaan ulos.
9. Laita kateetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se poltettavan kotitalousjätteen mukana.

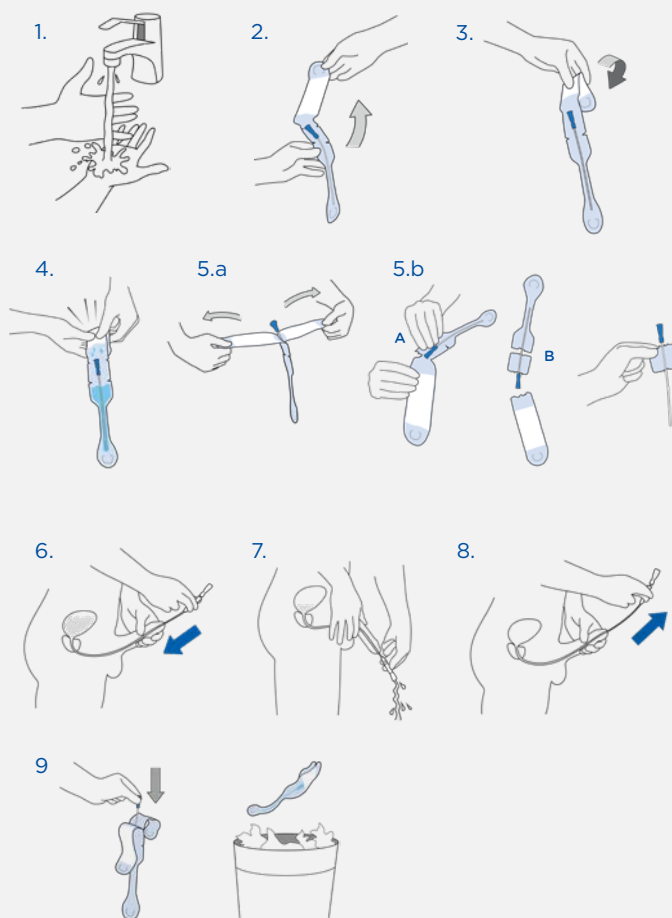


Erityisohjeet kaarevakärkisellä Tiemann-katetrilla katetroimiseen.

Tiemann-katetrin käytössä tarvitaan erityistä tekniikkaa. Saat lisätietoa tarvittavasta perehdytyksestä ja neuvonnasta sinua hoitavalta sairaanhoitajalta tai uroterapeutilta.

1. Huomaa kartiossa oleva merkki suhteessa kärkeen, kun viet katetria sisään virtsaputkeen. Se ohjaa pitämään katetrin kaarevan kärjen oikeassa suunnassa katetroinnin aikana.
2. Pidä kaareva kärki kasvoihin päin/ylöspäin sisäänviennin ja koko katetroinnin ajan, katetrin poistaminen mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti noudata terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita.

Tiemann/Coudé

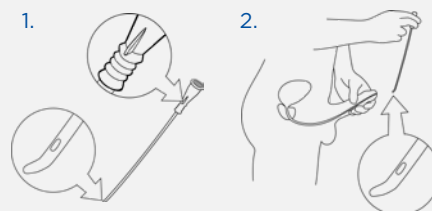

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi. Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi



Wellspect Oy, Piispanilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal
Tel: 031 376 40 00. www.wellspect.se

CE 2797

Rx Only