

LoFric – miehet

LoFric® kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri.

Virtsarakon toistokatetrointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.


Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

Käyttöohjeet

1. Pese kädet vedellä ja saippualla ennen katetrointia..
2. Avaa vetämällä pakkauksen kartiopään avausliuskoista.
3. Täytä pakkaus puhtaalla vedellä, kotona vesijohtovedellä ja sairaalassa steriilillä vedellä tai suolaliuksella. Liota katetria 30 sekuntia ennen käyttöä.
4. Kun valmistaudut katetrointiin, irrota suojapaperi ja kiinnitä tuote tarraliuskalla kuivaan pintaan.
5. Ota katetri pakkauksesta.
6. Nosta penis kohti vatsaa virtsaputken suoristamiseksi. Vie katetri hitaasti virtsaputkeen koskematta käsin katetriletkuun. Kun virtsa alkaa valua, vie katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
7. Palauta penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin läpi.
8. Kun virtsan tulo lakkaa, vedä katetria hitaasti hiukan ulospäin. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota virtsan tulon loppumista, jotta varmistat virtsarakon täydellisen tyhjenemisen. Poista sitten katetri.
9. Aseta katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se asianmukaisesti (paikalliset määräykset voivat vaihdella).

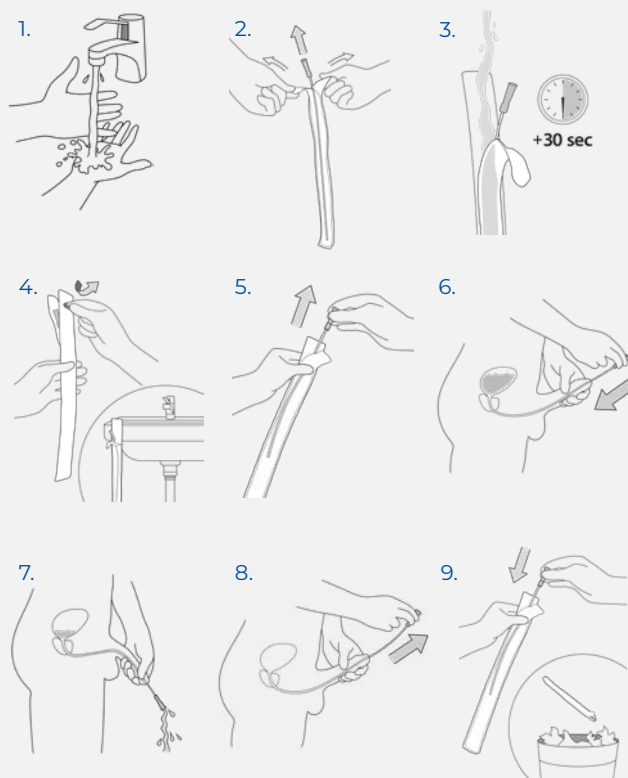


Erityisohjeet kaarevakärkiselä Tiemann-katetrilla katetroimiseen.

Tiemann-katetrin käytössä tarvitaan erityistä tekniikkaa. Saat lisätietoa tarvittavasta perehdytyksestä ja neuvonnasta sinua hoitavalta sairaanhoitajalta tai uroterapeutilta.

1. Huomaa kartiossa oleva merkki suhteessa kärkeen, kun viet katetria sisään virtsaputkeen. Se ohjaa pitämään katetrin kaarevan kärjen oikeassa suunnassa katetroinnin aikana.
2. Pidä kaareva kärki kasvoihin päin/ylöspäin sisäänviennin ja koko katetroinnin ajan, katetrin poistaminen mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti noudata terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita.

Tiemann/Coudé

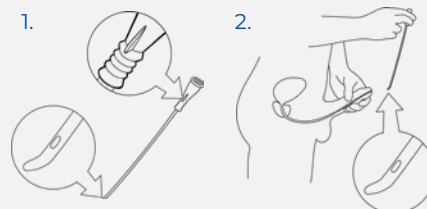

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

