

## LoFric Primo - naisille

LoFric® Primo™ hydrofiilinen kertakäyttökatetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokatetrointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.


LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

### Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Avaa pakkaus. Pidä pakkaus pystyasennossa.
3. Taita ja purista nestepussia.
4. Aktivoi katetri puristamalla suolaliuosta sisältävää nestepussia. Katetri on käyttövalmis.
5. a) Avaa pakkaus, ota katetri pakkauksesta katetrointia varten.  
b) VALINNAINEN: avaa sisäänvientiapua käyttäen: Irrota vesipussi repäisemällä liuska "A". Repäise kohdasta "B". Käytä jäljelle jäänyttä osaa sisäänvientiapuna. (Tämä osa mahdollistaa hyvän otteen ja mahdollistaa katetrin sisäänviennin katetriin käsin koskematta.)
6. Levitä häpyhuulia ja paikallista emättimen aukon yläpuolelle oleva virtsaputken suu. Työnnä katetri hitaasti toisella kädellä virtsaputkeen.
7. Kun virtsaa alkaa virrata, työnnä katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
8. Kun virtsaa ei enää valu katetrasta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten katetri kokonaan ulos.
9. Laita katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä palavana kotitalousjätteenä.

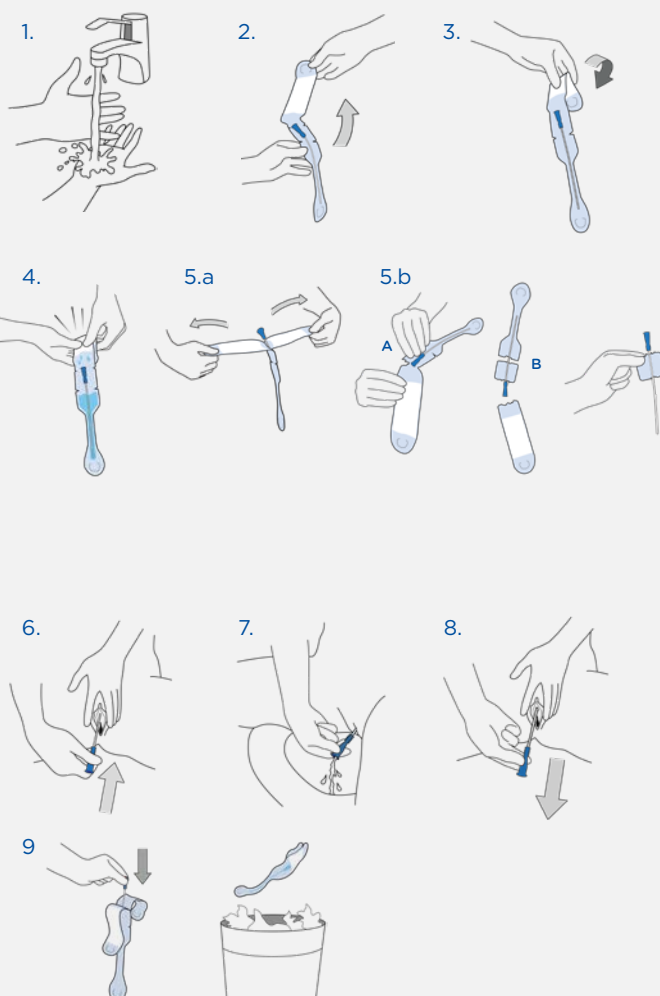

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkimme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.  
Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

**wellspect.fi**



Wellspect Oy, Piispanilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal  
Tel: 031 376 40 00. www.wellspect.se

CE 2797

Rx Only