

LoFric Hydro-Kit - miehille

LoFric® Hydro-Kit™ hydrofiilinen kertakäyttökateetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokateetrointihitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-kateetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.


Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Pidä tuote pystyasennossa. Taita nestetyynyä ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas katetriin.
3. Käännä tuote ylösalaisin ja anna suolaliuoksen valua keräyspussiin.
4. Repäise lenkkien avulla kohdasta "A" paljastaaksesi katetrin kärkiosan.
5. Käytä avaamiseen lenkkejä kohdassa "B/C". Käytä pakkauksen osaa "B" asettimena.
6. Vedä katetria varovasti ulos pakkauksesta, kunnes liitin-kartio lukkiutuu paikoilleen varmistaen pitävän liitoksen katetrin ja keräyspussin välillä.
7. Nosta penistä ylöspäin vatsaa kohti. Vie katetri hitaasti virtsaputkeen. Kun virtsaa alkaa valua, työnnä katetria vielä hiukan pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat sisällä virtsarakossa.
8. Laske penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin kautta.
9. Kun virtsaa ei enää valu katetrin kautta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten katetri kokonaan ulos.
10. Työnnä katetri takaisin keräyspussiin.
11. Ennen kuin heität tuotteen roskeen, tyhjennä pussi sen kaulan kautta tai solmi pussin suu ja tyhjennä pussi repäisykohdan kautta. Voit myös solmia pussin ja hävittää sen sellaisenaan.

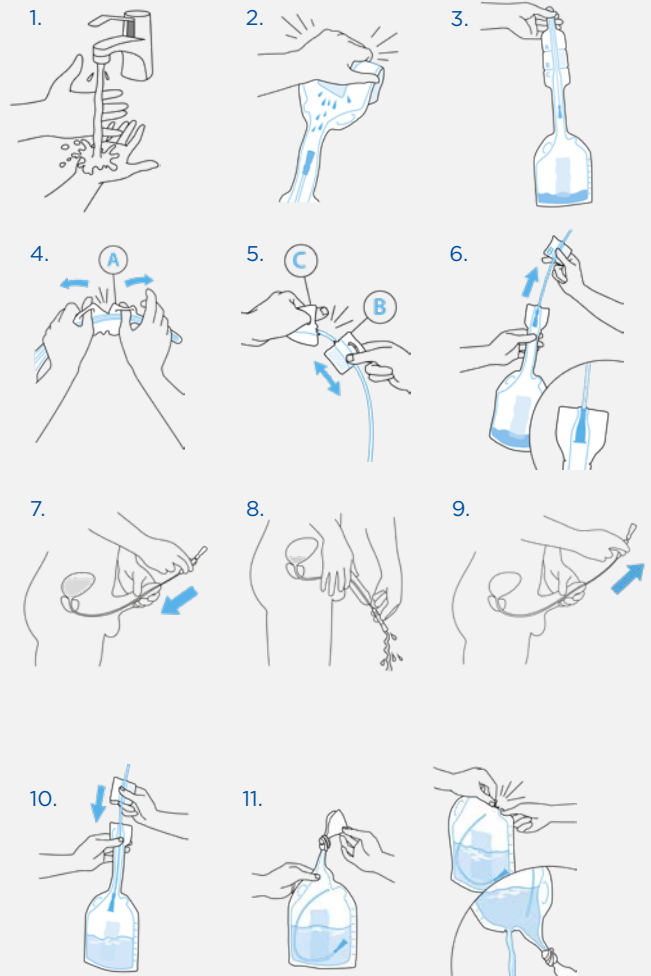


Erytisohteet kaarevakärkisellä Tiemann-katetrilla katetroimiseen.

Tiemann-katetrin käytössä tarvitaan erityistä tekniikkaa. Saat lisätietoa tarvittavasta perehdytyksestä ja neuvonnasta sinua hoitavalta sairaanhoitajalta tai uroterapeutilta.

1. Huomaa kartiossa oleva merkki suhteessa kärkeen, kun viet katetria sisään virtsaputkeen. Se ohjaa pitämään katetrin kaarevan kärjen oikeassa suunnassa katetroinnin aikana.
2. Pidä kaareva kärki kasvoihin päin/ylöspäin sisäänviennin ja koko katetroinnin ajan, katetrin poistaminen mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti noudata terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita.

Tiemann/Coudé

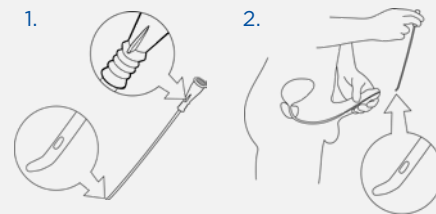

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).
Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)



Wellspect Oy, Piispansilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only