

LoFric Sense – naisille

LoFric® Sense™ hydrofiilinen kertakäyttökatetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokatetrointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.


Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Aktivoi katetri puristamalla suolaliuosta sisältävää nesteytynyä. Katetri on tämän jälkeen käyttövalmis.
3. Vedä avausliuskasta avataksesi pakkauksen.
4. VALINNAINEN: Käytä takana olevaa tarralappua tuotteen kiinnittämiseen kuivalle ja puhtaalle pinnalle.
5. Pidä avausliuskaa paikallaan ja ota katetri pakkauksesta.
6. Levitä häpyhuulia ja paikallista emättimen aukon yläpuolelle oleva virtsaputken suu. Työnnä katetri hitaasti toisella kädellä virtsaputkeen.
7. Kun virtsaa alkaa virrata, työnnä katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
8. Kun virtsaa ei enää valu katetrasta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten katetri kokonaan ulos.
9. Laita katetri takaisin pakkaukseen. Pakkaus toimii hygieenisenä ja huomaamattomana jätepussina. Hävitä poltettavan kotitalousjätteen mukana.

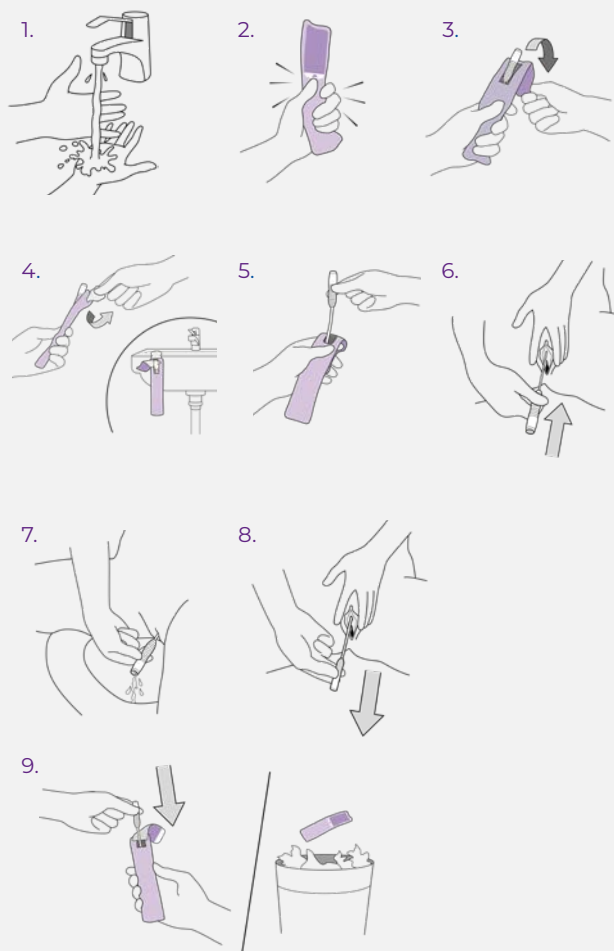

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkien ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.
Osallistu keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi



Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Valmistaja: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 279

R_x On