

## LoFric Elle - naisille

LoFric® Elle™ hydrofiilinen, käyttövalmis kertakäyttökatetri.

Virtsarakon toistokatetrointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.


LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

### Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Riko ylempi steriili suojakorkki.
3. Riko alempi steriili sulku tarttumalla säiliöön ja
  - a) kierrä (kuva 3a) tai taivuta yläosaa varovasti (kuvat 3b ja 3c).
  - d) pidä katetria pystyasennossa ja poista katetri säiliöstä pystysuoraan.
4. Tyhjennä jäljellä oleva neste säiliöstä (wc-pönttöön tai pesu-altaaseen).
5. **VAIHTOEHTOINEN:** Voit käyttää säiliötä kahvana, jos liität sen katetriin.
6. Kallista lantiota eteenpäin, levitä häpyhuulia vetäen niitä varovasti ylöspäin paikallistaaksesi aivan emättimen aukon yläpuolella olevan virtsaputken suun. Työnnä katetri toisella kädellä hitaasti virtsaputkeen, kunnes virtsa alkaa virrata. Työnnä katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakossa.
7. Kun virtsaa ei enää valu katetrista, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä.
8. Laita katetri takaisin säiliön sisään. Hävitä tai kuljeta katetria laukussasi, kunnes voit hävittää sen.  
**Huom!** Säiliö on kierrätettävää materiaalia.

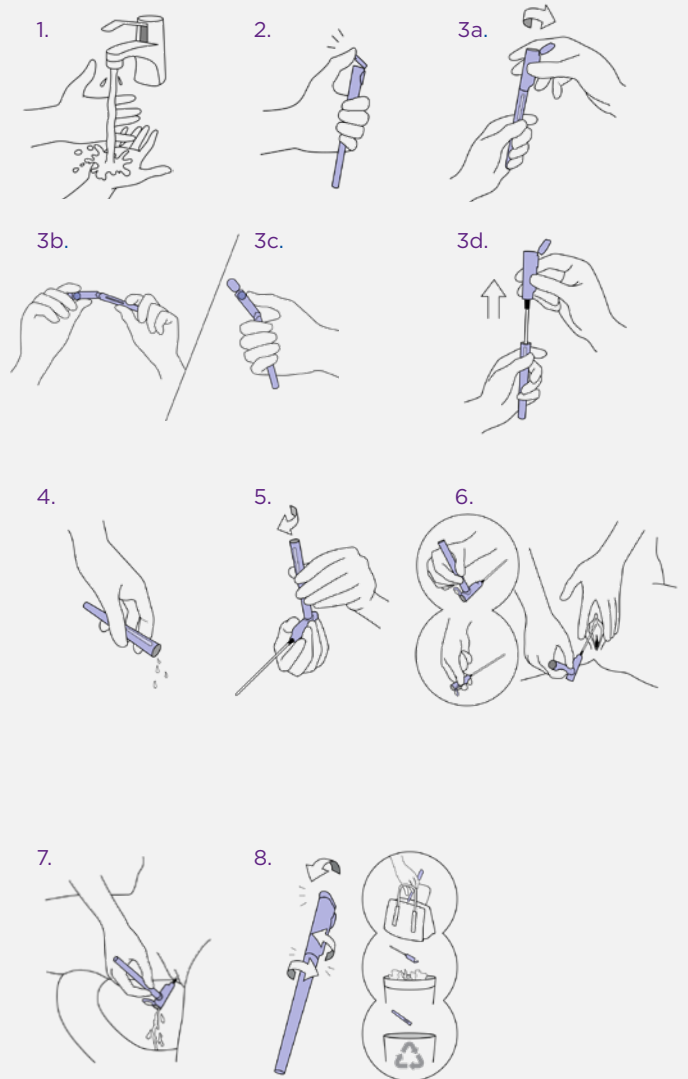

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.

Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://wellspect.fi)



Wellspect Oy, Piispansilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only