
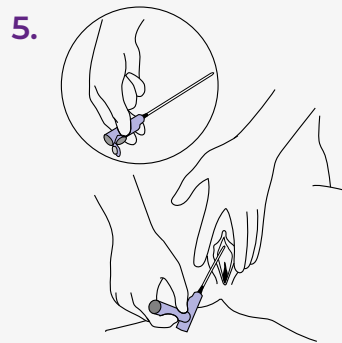
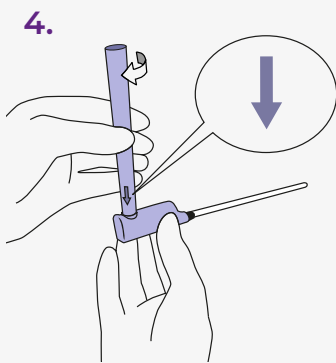


Käyttöohje LoFric Elle-katetri

Skanna saadaksesi
yksityiskohtaiset
ohjeet

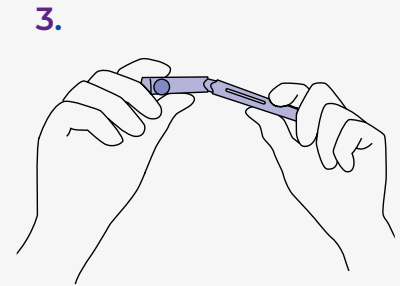

1. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Avaa korkki.
3. Irrota katetri säiliöstä. Käytä molempia käsiä ja taivuta avataksesi. Vedä katetri ulos. Tyhjennä ensin neste säiliöstä (wc-pönttöön tai käsienpesualtaaseen). Voit nyt katetroida.
4. Käytettäessä kahvaa, kiinnitä säiliö kahvaksi katetriin kiertämällä myötäpäivään. Varmista, että kahvassa oleva nuoli osoittaa katetriin päin.
5. Katetria voidaan käyttää kahvan kanssa tai ilman. Kahva helpottaa ylittämistä ja tekee katetroinnista hygieenisempää. Levitä

häpyhuulia paikallistaaksesi virtsaputken suun. Vie katetri virtsaputkeen, kunnes virtsa alkaa virrata. Vie katetria vielä hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakossa.

Kun virtsaa ei enää valu katetrista, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä.

6. Aseta katetri takaisin säiliön sisään. Hävitä katetri heti tai kuljeta katetria laukussasi, kunnes voit hävittää sen. Huomio! Säiliön voi kierrättää muovipakkausjätteenä.

Tärkeää tietoa

LoFric® Elle™ on kertakäyttöinen, käyttövalmis, hydrofiilinen virtsakatetri.

Naiskäyttäjille; aikuisille, nuorille ja lapsille.

Lyhytkestoiseen ja pitkäaikaiseen virtsarakon hallintaan toistokatetroinnin avulla.

LoFric-katetri on tarkoitettu käytettäväksi vain terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana.

Varmista, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja ja koulutusta katetrointitoimenpiteestä ennen käyttöä.

Katso pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeitä tietoja ja yksityiskohtaiset ohjeet.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Möndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only