

LoFric Origo - miehille

LoFric® Origo™ hydrofiilinen kertakäyttökatetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokattarointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia kattarointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

A. Vinkkejä säilytykseen ennen käyttöä.


Taitettavissa taskukokoon.

Käytä lovea pitämään katetri taiteltuna.



Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Aktivoi katetri puristamalla suolaliuosta sisältävää nesteytynyä. Tämän jälkeen katetri on käyttövalmis.
3. Veda avausliuskasta avataksesi pakkauksen.
4. VALINNAINEN: Kiinnitä pakkaus kuivalle ja puhtaalle pinnalle pakkauksen takaosassa olevalla tarralapulla.
5. Ota katetri pakkauksesta.
VALINNAINEN: Käytä liikuteltavaa asetinta, joka takaa paremman otteen ilman, että katetrin letkuosaan tarvitsee koskea paljain käsin.
6. Nosta penistä ylöspäin vatsaa kohti. Tässä asennossa virtsaputki pitenee ja muuttuu U-muotoiseksi. Tämä helpottaa katetrin ohjaamista virtsarakkoon.
7. Vie katetri hitaasti virtsaputkeen. Kun virtsaa alkaa valua, työnnä katetria vielä hiukan pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat sisällä virtsarakossa.
8. Laske penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin kautta.
9. Kun virtsaa ei enää valu katetrin kautta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten katetri kokonaan ulos.
10. Laita katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se poltettavan kotitalousjätteen mukana.

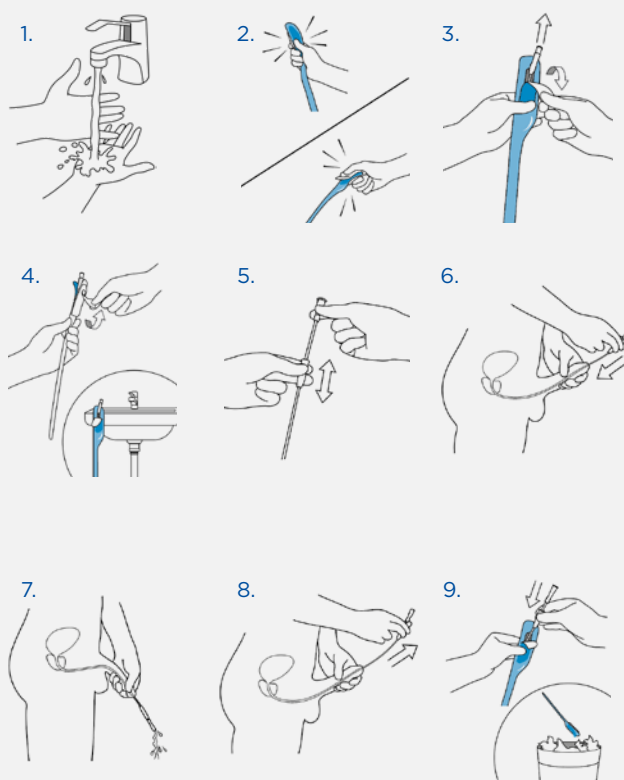


Erityisohjeet kaarevakärkisellä Tiemann-katetrilla katetroimiseen.

Tiemann-katetrin käytössä tarvitaan erityistä tekniikkaa. Saat lisätietoa tarvittavasta perehdytyksestä ja neuvoista sinua hoitavalta sairaanhoitajalta tai uroterapeutilta.

1. Huomaa kartiossa oleva merkki suhteessa kärkeen, kun viet katetria sisään virtsaputkeen. Se ohjaa pitämään katetrin kaarevan kärjen oikeassa suunnassa katetroinnin aikana.
2. Pidä kaareva kärki kasvoihin päin/ylöspäin sisäänviennin ja koko katetroinnin ajan, katetrin poistaminen mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti noudata terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita.

Tiemann/Coudé

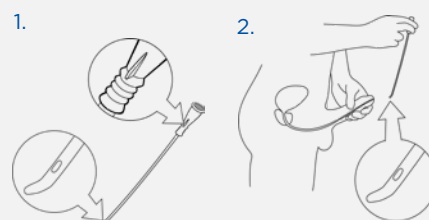

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).
Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)



Wellspect Oy, Piispansilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only