

## LoFric - miehet

LoFric® kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri.

Virtsarakon toistokatetrointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.


Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

### Käyttöohjeet

1. Pese kädet vedellä ja saippualla ennen katetrointia.
2. Avaa vetämällä pakkauksen kartiopään avausliuskoista.
3. Täytä pakkaus puhtaalla vedellä, kotona vesijohtovedellä ja sairaalassa steriilillä vedellä tai suolaliuoksella. Liota katetria 30 sekuntia ennen käyttöä.
4. Kun valmistaudut katetrointiin, irrota suojapaperi ja kiinnitä tuote tarraliuskalla kuivaan pintaan.
5. Ota katetri pakkauksesta.
6. Nosta penis kohti vatsaa virtsaputken suoristamiseksi. Vie katetri hitaasti virtsaputkeen koskematta käsin katetriletkuun. Kun virtsa alkaa valua, vie katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
7. Palauta penis normaaliasentoon, kun virtsaa alkaa valua katetrin läpi.
8. Kun virtsan tulo lakkaa, vedä katetria hitaasti hiukan ulospäin. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota virtsan tulon loppumista, jotta varmistat virtsarakon täydellisen tyhjenemisen. Poista sitten katetri.
9. Aseta katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se asianmukaisesti (paikalliset määräykset voivat vaihdella).

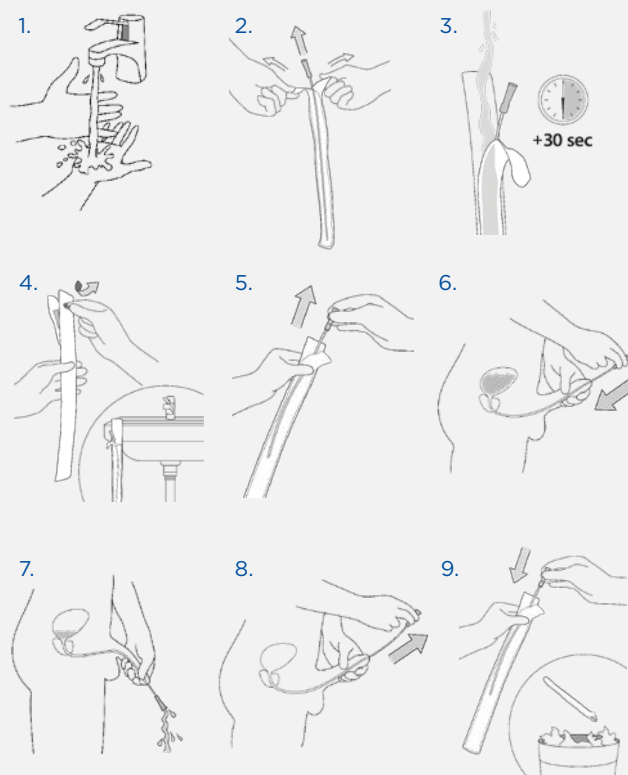


### Erityisohjeet kaarevakärkisellä Tiemann-katetrilla katetroimiseen.

Tiemann-katetrin käytössä tarvitaan erityistä tekniikkaa. Saat lisätietoa tarvittavasta perehdytyksestä ja neuvonnasta sinua hoitavalta sairaanhoitajalta tai uroterapeutilta.

1. Huomaa kartiossa oleva merkki suhteessa kärkeen, kun viet katetria sisään virtsaputkeen. Se ohjaa pitämään katetrin kaarevan kärjen oikeassa suunnassa katetroinnin aikana.
2. Pidä kaareva kärki kasvoihin päin/ylöspäin sisäänviennin ja koko katetroinnin ajan, katetrin poistaminen mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti noudata terveydenhuollon ammattilaisen antamia erityisohjeita.

### Tiemann/Coudé

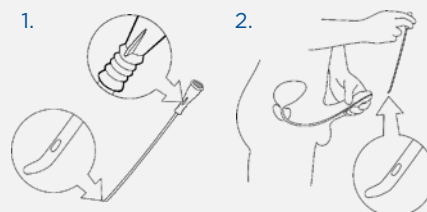

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden kasvattamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme virtsarakon ja suoliston hallintaan tarkoitettuja luotettavia ja helppokäyttöisiä tuotteita, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmasto-neutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. He innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

