

## LoFric Hydro-Kit – naisille

LoFric® Hydro-Kit™ hydrofiilinen kertakäyttökateetri, mukana aktivointiin tarvittava suolaliuos.

Virtsarakon toistokateetrintihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.


LoFric-kateetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.

Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetrintiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

### Käyttöohjeet

1. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.
2. Pidä tuote pystyasennossa. Taita nestetyynyä ja purista. Anna suolaliuoksen valua alas katetriin.
3. Käännä tuote ylösalaisin ja anna suolaliuoksen valua keräyspussiin.
4. Repäise lenkkien avulla kohdasta "A" paljastaaksesi katetrin kärkiosan.
5. Käytä avaamiseen lenkkejä kohdassa "B/C". Käytä pakkauksen osaa "B" asettimena.
6. Vedä katetria varovasti ulos pakkauksesta, kunnes liitinkartio lukkiutuu paikoilleen varmistaen pitävän liitoksen katetrin ja keräyspussin välillä.
7. Levitä häpyhuulia ja paikallista emättimen aukon yläpuolelle oleva virtsaputken suu. Työnnä katetri hitaasti toisella kädellä virtsaputkeen.
8. Kun virtsaa alkaa virrata, työnnä katetria hieman pidemmälle varmistaaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
9. Kun virtsaa ei enää valu katetrin kautta, vedä katetria hitaasti ulos. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota kunnes virtsan tulo lakkaa varmistaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Vedä sitten katetri kokonaan ulos.
10. Työnnä katetri takaisin keräyspussiin.
11. Ennen kuin heität tuotteen roskeeseen, tyhjennä pussi kaulan kautta tai solmi pussin suu ja tyhjennä pussi repäisykohdan kautta. Voit myös solmia pussin ja hävittää sen sellaisenaan.

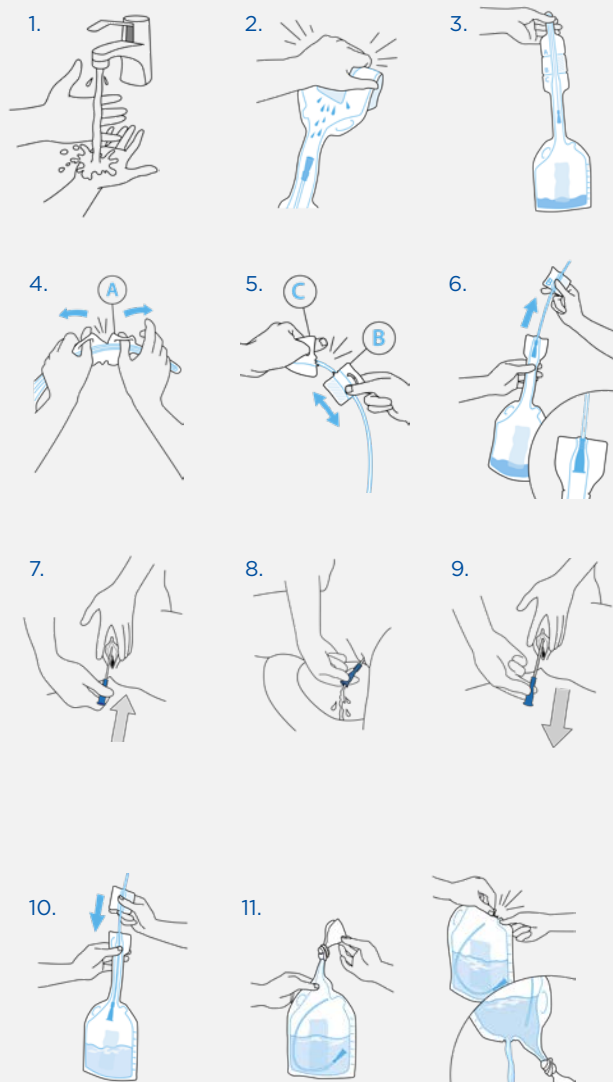

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi. Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://wellspect.fi)



Wellspect Oy, Piispanilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puhelin: 09 867 6160.

LoFric



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal  
Tel: 031 376 40 00. [www.wellspect.se](http://www.wellspect.se)

CE 2797

Rx Only