

Navina Classic -tuotetiedot

Navina™ Systems -järjestelmät on kehitetty auttamaan ulosteinkontinenssista, kroonisesta ummetuksesta ja/tai aikaa vievistä suolen toimittamisista kärsiviä aikuisia ja yli 3-vuotiaita lapsia.

Johtamalla vettä paksusuolen alaosaan suolen peristalttiset lihakset voidaan aktivoida, jolloin ne alkavat tyhjentää paksusuolta ja peräsuolta. Aikuisen tulee olla lapsen mukana toimenpiteessä, kunnes lapsi kykenee selviytymään siitä itsenäisesti.

- Keskustele aina suolihuuhteluun erikoistuneen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen Navina Systems -järjestelmän käyttöä.
- Käytä Navina Systems -järjestelmää ainoastaan käyttötarkoitukseen, joka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
- Navina Systems -järjestelmä on henkilökohtainen eikä sen käyttöä tule jakaa toisen henkilön kanssa.
- Navina rektaalikatetri regular on tarkoitettu vain aikuisen käyttöön.
- Navina rektaalikatetri small on tarkoitettu käytettäväksi vain valkoisten Navina System -järjestelmien kanssa.

Vasta-aiheet

Älä käytä Navina™ Classic -järjestelmää, jos sinulla on jokin seuraavista:

- peräaukon tai peräsuolen ahtauma
- aktiivinen tulehduksellinen suolistotauti
- akuutti divertikuliitti
- paksu- ja peräsuolen syöpä
- iskeeminen koliitti
- aiempi peräaukon tai peräsuolen leikkaus alle 3 kuukautta sitten
- aiempi tähystyksessä tehty polyypin poistoleikkaus alle 4 viikkoa sitten.

Koska vasta-aiheiden luettelo ei ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaiset ottavat aina huomioon myös yksilölliset tekijät.

Navina Classic -järjestelmä

Viite	Tuote	Sisältö
6900545	Navina Classic -järjestelmä, Regular Vain aikuisille	1 Navina Classic -ohjausyksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 rektaalikatetria, Regular 1 Navina-kotelo 1 lisätarvikepakkaus
6900745	Navina Classic -järjestelmä, Small Kolmesta ikävuodesta eteenpäin	1 Navina Classic -ohjausyksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 rektaalikatetria, Small 1 Navina-kotelo 1 lisätarvikepakkaus
6901745	Navina Classic -järjestelmä, kartio Kolmesta ikävuodesta eteenpäin	1 Navina Classic -ohjausyksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 kartiota 1 Navina-kotelo 1 lisätarvikepakkaus



Navina Classic -järjestelmän kulutustarvikkeet

Viite	Tuote	Sisältö	Teknistä tietoa
6900645	Navina Classic -järjestelmä, Regular täyttöpakkaus	1 Navina Classic -ohjauksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 Navina-katetria, Regular*	100 käyttökertaa 1.5 litraa, taitettava, asteikko kaksinkertainen. 100 käyttökertaa Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6900845	Navina Classic -järjestelmä, Small täyttöpakkaus	1 Navina Classic -ohjauksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 Navina-katetria, Small	100 käyttökertaa 1.5 litraa, taitettava, asteikko kaksinkertainen. 100 käyttökertaa Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6901845	Navina Classic -järjestelmä, kartio täyttöpakkaus	1 Navina Classic -ohjauksikkö 1 vesisäiliö 1 letkustopakkaus 2 kartiota	100 käyttökertaa 1.5 litraa, taitettava, asteikko kaksinkertainen. 100 käyttökertaa Hydrofiiliset, kertakäyttöiset kartiot.
6900310	Kulutussetti, Regular	1 vesisäiliö 15 Navina-katetria, Regular*	1.5 litraa, kokoontaitettava, asteikko kaksinkertainen. Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6900410	Kulutussetti, Small	1 vesisäiliö 15 Navina-katetria, Small	1.5 litraa, kokoontaitettava, asteikko kaksinkertainen. Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6901610	Kulutussetti, kartio	1 vesisäiliö 15 kartiota	1.5 litraa, kokoontaitettava, asteikko kaksinkertainen. Hydrofiiliset, kertakäyttöiset kartiot.
6894010	Rektaalikatetrisetti, Regular*	10 katetria	Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6894310	Rektaalikatetrisetti, Small	10 katetria	Hydrofiiliset, kertakäyttöiset katetrit.
6901110	Letkustopakkaus	1 katetri-/kartioletku 1 vesisäiliöletku	100 käyttökertaa 100 käyttökertaa
6901200	Lisätarvikepakkaus	2 tarttumisrengasta (1 vertikaalinen, 1 horisontaalinen) 1 kaulanauha 1 asetushihna 1 Navina Classic -asetussolki	
6901345	Navina Classic -ohjauksikkö	1 Navina Classic -ohjauksikkö	100 käyttökertaa

* Vain aikuisille
Kaikki Navina Classic -komponentit tulee hävittää kotitalousjätteenä.

wellspect.fi

